

## Lavi White

### Branqueador Dental

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O produto é indicado para o branqueamento dentário, com resultados desde a primeira utilização. A fórmula exclusiva do gel é ativada em contacto com a saliva presente na superfície dos dentes.

#### USO PREVISTO

O gel branqueador é indicado para uso doméstico, de acordo com a diretiva europeia 2011/84/EU relativa a produtos cosméticos.

A recomendação para o efeito previsto, é de 15 dias consecutivos de utilização.

#### INGREDIENTES

Glicerina, Propilenoglicol, Carbómero, Acessulfame de Potássio, Mica, Mentol, Peróxido de Carbonato de Sódio, CI 77891, Trietanolamina.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Lave os dentes com pasta dentífrica.
2. Lave as mãos antes da aplicação.
3. Aplique uma linha fina de gel branqueador na moldeira em todo o perímetro interno em correspondência com o lado dos dentes (Fig. 1).
4. Insira a moldeira na boca, mordendo suavemente (Fig. 2).
5. Feche a boca e deixe atuar durante 15 minutos.
6. Logo após a aplicação lave muito bem as mãos.
7. Lave abundantemente a boca após o tempo indicado.
8. Lave a moldeira apenas com água, após cada aplicação.



#### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Recomenda-se a utilização máxima do produto uma vez ao dia. • Não ingerir. • Evite o contacto com os olhos. • Apenas indicado para adultos. • Manter fora da vista e do alcance das crianças. • Mulheres grávidas ou a amamentar não devem utilizar. • O gel branqueador apresenta o efeito esperado apenas em dentes naturais, pelo que não terá qualquer efeito branqueador em reconstruções, tais como, implantes, coroas, pontes e facetas. • Não utilize caso tenha as gengivas inflamadas, fragilidade do esmalte ou sensibilidade dentária. • Não use o produto nas duas semanas anteriores ou posteriores a alguma intervenção cirúrgica dentária ou tratamento ortodôntico. Consulte o seu dentista, especialmente se sofrer de hipoplasia ou outras patologias relacionadas à fragilidade do esmalte.

#### RESULTADO DA EFICÁCIA

A eficácia foi comprovada num estudo clínico baseado na avaliação objetiva e semi-quantitativa, através da pontuação clínica da cor do dente, segundo o guia de cores R-20 *Bleaching Shade Guide*.

#### VALIDADE DO PRODUTO

O prazo de validade do produto é de 30 meses, após a data de fabrico.

#### PERÍODO APÓS ABERTURA

O prazo recomendado para que o produto seja utilizado após abertura é de 12 meses.

#### ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local fresco e seco.

**CONDIÇÕES DE DESCARTE**

Não descartar o produto em lixo comum.

A caixa deve ser espalmada e colocada no ecoponto azul.

O tubo deve ser esvaziado e colocado no ecoponto amarelo.







Em caso de dúvida, consulte o seu farmacêutico.

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO**

O produto pode ser apresentado em:

- Embalagem unitária;
- Caixa com 20 unidades.

**SIMBOLOGIA**

|                                                                                   |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Fabricante                                                   |
|  | Indicação do período após abertura (PAO)                     |
|  | Cumpra a quantidade nominal (peso ou volume) do seu conteúdo |
|  | Data de durabilidade mínima                                  |
|  | Instruções de uso                                            |
|  | Ponto verde                                                  |

**INFORMAÇÃO DE CONTACTO**

**Fabricante:**

LAVI DISPOSITIVOS MÉDICOS LDA.

Endereço: Rua Dr. Amílcar de Castro S/N,

4775-105 – Barcelos | Portugal Telefone

: +351 252 967 068

<http://www.lavimedical.com>

**DETENTOR DO REGISTO NO BRASIL:**

LAVI DISPOSITIVOS MÉDICOS DO BRASIL.

CNPJ 45.463.033/0001-06

Endereço: Rua Araújo Figueiredo, 119 - sala 1002 – Centro

Florianópolis - Santa Catarina - Brasil

Telefone: 048 4042 2225

[laviwhite@lavimedical.com](mailto:laviwhite@lavimedical.com)

Responsável Técnica: Tatiana Beras – CRBIO nº110297/03-D

Número da notificação ANVISA: 82541430001